

# 【尿バッグを車椅子に簡単取付】

## スマートハンガー I型 (車椅子取付尿バッグハンガー)

特許申請中



尿バッグ取付前



尿バッグ取付後

尿バッグを車椅子の座席の下に取付けることで患者さんの脚で尿バッグを目隠しすることができます

尿バッグの取付高さは自由に変えられ、そのまま車椅子を折りたたむことができます

また、車椅子の後方に取付けることもできます



株式会社 樋原製作所

〒590-0153 大阪府堺市南区大庭寺611-3 TEL.072-293-1111  
e-mail hibara@hbrind.co.jp FAX.072-293-1112  
URL <https://www.hbrind.co.jp>

## 【尿バッグを車椅子に簡単取付】

特許申請中

# スマートハンガー I型

(車椅子取付尿バッグハンガー)



### スマートハンガ-前方取付

車椅子の左右ティッピングバー前方パイプにスマートハンガ-の左右クランプで挟んで取付ます  
上部に付いているハンガ-に尿バッグをかけます

尿バッグ前方取付 ( 取付前 取付後 )



### スマートハンガ-後方取付

車椅子の左右ティッピングバーパイプにスマートハンガ-の左右クランプで挟んで取付ます  
上部に付いているハンガ-に尿バッグをかけます

尿バッグ後方取付 ( 取付前 取付後 )



### スマートハンガ-折り畳み

スマートハンガ-が付いた状態で折り畳むことができます

### スマートハンガ-高さ調整

スマートハンガ-左右パイプを回転させて高さを調整します

スマートハンガ-折り畳み

スマートハンガ-MAX高さ

本体概略最小寸法:W80×H300×D100

スマートハンガ-長さ:300~420mm

スマートハンガ-床からのハンガ-高さ

:約250~400mm

\*注:前方・後方取付、車椅子で変化します

スマートハンガ-耐荷重:3kg

販売元